

Série VS 9/8

Guide de référence rapide des moniteurs de signes vitaux

Remarque : le guide de référence rapide n'est pas destiné à remplacer le manuel d'utilisation. Avant d'utiliser l'équipement, lisez attentivement le manuel d'utilisation et suivez les instructions afin de garantir la sécurité de l'opérateur, du patient et de l'équipement.

Aperçu



- 1 Connecteur du brassard PNI
- 2 Connecteur de câble SpO₂
- 3 Sortie de CO₂
- 4 Raccord de la tubulure d'échantillonnage CO₂
- 5 Interrupteur d'alimentation

- 6 Touche Réinit. alar./Pause
- 7 Touche Marche/Arrêt de la PNI
- 8 Touche d'admission d'un patient
- 9 Sélecteur

Raccourcis

Symbole	Fonction
 Revue	Ouvre le menu Revue .
 Enreg.	Enregistre les informations saisies.
 Menu principal	Ouvre le menu principal.

Symbole	Fonction
 Patient	Affiche la liste des patients.
 Effacer	Efface toutes les informations saisies.
 Autres	Affiche d'autres raccourcis.

Symbole	Fonction
 Suivant	Affiche l'écran suivant. (Vous pouvez également balayer l'écran principal vers le haut pour afficher l'écran suivant.)
 Pause alar.	Met en pause les alarmes physiologiques.
 Objectif cible	Affiche l'écran Objectif cible .

Symbole	Fonction
 Retour	Affiche l'écran précédent. (Vous pouvez également balayer l'écran principal vers le bas pour afficher l'écran précédent.)
 Réinit. alar.	Réinitialise le système d'alarme.

Mise en marche du moniteur

Appuyez sur cet interrupteur d'alimentation pour mettre le moniteur sous tension.

Sélection d'un flux de travail

Appuyez sur  dans l'angle supérieur gauche de l'écran pour sélectionner un flux de travail.

- Sélectionnez un flux de travail sous **Mesure Ponc** pour que le moniteur fonctionne en mode **Mesure Ponc**.
- Sélectionnez un flux de travail sous **Surveillance continue** pour que le moniteur fonctionne en mode **Surveillance continue**.

Connexion en tant que médecin

1. Appuyez sur  dans l'angle supérieur droit de l'écran.
2. Saisissez le terme **Médecin** et le **Mot de passe (le cas échéant)**.
3. Sélectionnez **Connexion**.

Si vous connectez un lecteur de codes-barres à votre moniteur, vous pouvez lire votre code-barres ou votre carte RFID pour saisir les informations de connexion.

Admission d'un patient

1. Sélectionnez le raccourci .
2. Sélectionnez un patient depuis l'**Historique patients** ou la **Liste ADT**, puis sélectionnez **Admettre**.
3. Modifiez les informations patient selon les besoins. Sélectionnez **OK**.

Si vous connectez un lecteur de codes-barres à votre moniteur, vous pouvez analyser le code-barres du patient pour accéder au numéro de dossier médical de ce patient.

Mesure de la PNI

- Appuyez sur  pour définir la position du patient et le site de mesure.
- Appuyez sur  pour démarrer la mesure.
- En mode **Surveillance continue**, sélectionnez la zone PNI pour accéder au menu PNI.
- Si trois points (...) s'affichent en bas de la zone PNI, balayez l'écran vers la droite pour afficher un autre écran.

Mesure de la température

- P/M : P signifie mode **Prédictif** et M signifie mode **Moniteur** (SmarTemp).
-  : indique le site de mesure actuel.
-  : appuyez sur ce symbole pour saisir manuellement une valeur de température mesurée.

Saisie manuelle de la valeur RR

1. Appuyez sur  ou  dans la zone Resp. Une horloge s'affiche et commence à chronométrer.
2. Comptez le nombre total de respirations du patient au cours de la dernière minute.
3. Saisissez le nombre et appuyez sur .

Saisie de paramètres manuels

Sélectionnez un paramètre dans la liste et saisissez les informations comme indiqué ci-dessous :

-  : appuyez sur ce symbole pour saisir une valeur.
-  : appuyez sur ce symbole pour afficher les options.

Enregistrement des données

1. Appuyez sur le raccourci  pour enregistrer les données physiologiques du patient actuel.
2. Assurez-vous que les données requises sont mesurées ou saisies correctement. Sélectionnez **Ok**.

Remarque : vous devrez peut-être balayer l'écran principal vers le haut ou appuyez sur le raccourci  pour afficher le raccourci .

Alarmes

Symboles de l'état d'alarme

Symbole	Description	Symbole	Description
	Toutes les alarmes sont en pause.		Les alarmes sonores sont en pause.
	Les alarmes sonores sont désactivées.		Les alarmes sont acquittées et le système d'alarme est réinitialisé.
	Les alarmes physiologiques ou les alarmes du système sont désactivées.		

Mise en pause des alarmes/alarmes sonores

- Appuyez sur le raccourci  pour mettre les alarmes ou le son des alarmes en pause ou pour les relancer.
- Sur les moniteurs de la série VS 8, vous pouvez également appuyer sur la touche **Réinit. alar./Pause** et rester appuyé dessus pour mettre les alarmes ou le son des alarmes en pause ou pour les relancer.

Réinitialisation des alarmes

Appuyez sur le raccourci  pour acquitter les alarmes en cours et réinitialiser le système d'alarme.

Révision des tendances

Appuyez sur le raccourci  pour revoir les tendances, les notations et les événements.

